

# ELISPOON

Notice d'utilisation · User Guide

Cuillère auto-stabilisante · Self-stabilizing spoon

## MODE D'EMPLOI

**1 1 — Prise en main**  
Placez le manche dans la paume de la main et refermez les doigts dessus — contrairement à une cuillère classique tenue du bout des doigts.

**2 2 — Utilisation**  
Utilisez l'ELISpoon normalement. Le mécanisme compense automatiquement les mouvements du poignet. Le bol reste horizontal — la nourriture reste en place.

**3 3 — Remplir & manger**  
Remplissez le bol et portez-le à votre bouche. Aucun réglage nécessaire.

**4 4 — Entretien**  
Nettoyez à l'eau tiède avec un peu de savon. Séchez avant utilisation.

■ ■ Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées. Tenir hors de portée des jeunes enfants sans surveillance adulte.

## HOW TO USE

**1 1 — Hold**  
Rest the handle across your palm and wrap your fingers around it — unlike a regular spoon held with fingertips.

**2 2 — Use**  
Use ELISpoon normally. The mechanism automatically compensates for wrist movement. The bowl stays level — food stays in place.

**3 3 — Fill & eat**  
Fill the bowl and bring it to your mouth. No adjustment needed.

**4 4 — Care**  
Clean with warm water and mild soap. Dry before use.

■ ■ Do not use if any parts are damaged. Keep out of reach of young children without adult supervision.

<b>Teaspoon</b> 20 cm / 68 g	<b>Soup Spoon</b> 21 cm / 78 g	<b>Handle</b> 12 cm / Ø 1.9 cm	<b>Material</b> Food-safe
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ELI INNOVATION FRANCE — 73 Route de Corbas, 69200 Vénissieux, France — [contact@eli-innovation.com](mailto:contact@eli-innovation.com)

EU Responsible Person (GPSR EU 2023/988) — [elispoon.com](http://elispoon.com)